


# COMMENT METTRE UN APR N95 TYPE COQUILLE

1

AVANT D'ENTRER DANS LA ZONE CONTAMINÉE

- Se laver les mains
- Inspecter le N95

2

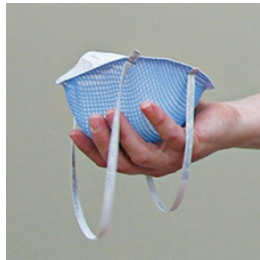

- Placer le N95 dans le creux de la main en laissant les courroies libres



- Mettre sous le menton et couvrir le nez



- Placer la courroie supérieure sur le haut de la tête



- Placer la courroie inférieure sur la nuque et sous les cheveux

ATTENTION

- Ne pas croiser ni tourner les courroies
- S'il y a une bande nasale, la modeler à la forme du nez avec l'index et le majeur des deux mains

3

## PROCÉDER AUX VÉRIFICATIONS D'ÉTANCHÉITÉ



À PRESSION NÉGATIVE

- Placer les mains sur le N95
- Inhaler profondément, le N95 devrait s'affaisser légèrement sur le visage



À PRESSION POSITIVE

- Souffler de l'air dans le N95
- Le N95 bombera légèrement

ATTENTION

- Si une des vérifications n'est pas réussie, repositionner le N95 et reprendre les deux vérifications.
- S'il n'est pas possible d'avoir un résultat concluant, n'entrez pas dans la zone contaminée et avisez immédiatement votre superviseur de la situation