

RETRAIT ÉQUIPEMENT PROTECTION ISOLEMENT GOUTTELETTES-CONTACT AVEC PORT DE LA PROTECTION OCULAIRE

Avant de sortir de la chambre

1. Détacher le cordon à la taille.
2. Retirer les gants.
3. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolisée.
Si non accessible, passer à l'étape suivante.
4. Détacher le cordon au cou et rabattre légèrement la blouse vers l'avant par les cordons.
5. Enlever la blouse de protection selon la méthode appropriée (voir vidéos disponibles sur le Mic).
6. Disposer de la blouse de protection selon qu'elle soit lavable ou jetable.
7. Sortir de la chambre (la porte peut demeurer ouverte).



Après être sorti de la chambre

1. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolisée.
2. Retirer la protection oculaire et la déposer sur un papier.
3. Retirer le masque de procédure et le jeter.
4. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolisée.
5. Mettre un nouveau masque de procédure.
6. Il est recommandé de procéder à la désinfection de la protection oculaire.

Désinfection de la protection oculaire

1. Enfiler des gants et désinfecter la protection oculaire.
2. Déposer sur une surface propre et **respecter le temps de contact** du produit.
 - Peut être ensuite rincée avec de l'eau du robinet, si la visibilité est compromise.
 - Jeter **seulement** si l'intégrité de la protection oculaire n'est plus assurée.
3. Enlever les gants.
4. Procéder à l'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolisée.

Consignes pour la réutilisation de la protection oculaire :

- Peut être conservée pour plusieurs quarts de travail, à condition que celle-ci soit désinfectée entre chaque utilisation.
- Entreposer la protection oculaire dans un sac identifié au nom du travailleur.
- Désinfecter la surface où la protection oculaire a été déposée, le cas échéant.

Consignes pour l'utilisation des blouses :

- La blouse en coton peut être utilisée pour ce type d'isolement.